



**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Dali Bluetooth

AD969


<https://www.ayudasdinamicas.com/dali-bluetooth/>



## Descripción

Ahora con mando inalámbrico sin cables (bluetooth). Elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.

## APP DALI-LOCK PARA MÓVIL. BLOQUEO DE LAS FUNCIONES DEL MANDO

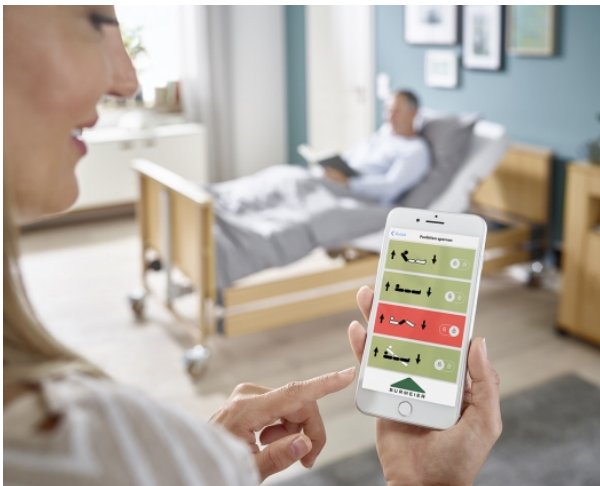



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

La cama Dali dispone de varias funciones para ajustar la posición del colchón. Pero a veces no es recomendable alguna posición debido a la patología del usuario.

Por ejemplo: si el cuidador quiere bloquear la función de Trendelenburg o para bajar el respaldo, nuestra aplicación Dali-Lock puede ayudar.

Esta aplicación funciona con Android o Apple. Se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones habituales totalmente gratuita.

La aplicación Dali-Lock

- Descargue la aplicación Dali-Lock gratuita en su smartphone Android o Apple
- Inicie la búsqueda de cama. La aplicación encontrará la cama Dali.
- Sincronice su smartphone con la cama escaneando el código en la parte posterior del mando.
- Ahora puede bloquear o desbloquear cada una de las posiciones de la cama.

## 24 VOLTIOS EN LA CAMA



24 voltios en la cama, la máxima protección para el usuario ya que todos los elementos a 230 voltios están fuera de la cama.

## POSICIÓN CONFORT





**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar con una visita,...). Esta posición es la mas parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras cama se adopta simplemente apretando un botón del mando.

#### **BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK**



Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas con el nuevo sistema Easy-Click.






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia



Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o con calcetines.

#### DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS

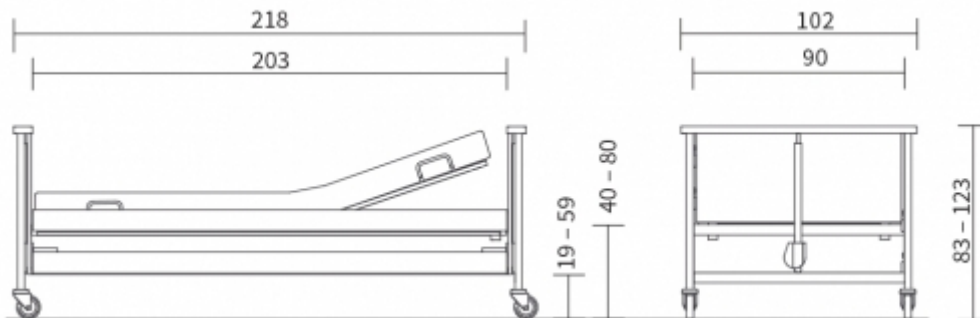

**185 kg**  
máximo

